

orthocaps[®]
creating smiles

ISTRUZIONI PER L'USO E LA CURA





#Congratulazioni

Grazie per aver scelto gli allineatori invisibili Orthocaps per la correzione dentale. Per ottenere i migliori risultati possibili, leggi attentamente questo manuale di istruzioni.

Ti ringraziamo per la fiducia e ti auguriamo di essere felice con il tuo nuovo, migliore sorriso!





DAYcaps



NIGHTcaps



#Prima le cose importanti...


La terapia è divisa in diversi passaggi. Per ogni fase del trattamento, riceverai due tipi di allineatori – durante il giorno vanno indossati i più sottili DayCaps, durante la notte i più spessi NightCaps. Per ottenere risultati apprezzabili in tempi brevi, è necessario indossare gli allineatori almeno 22 ore al giorno, rimuovendoli solo per mangiare e lavare i denti.

È assolutamente importante indossare gli allineatori Orthocaps nell'ordine predeterminato. Su ogni allineatore c'è un contrassegno per aiutare con la distinzione: D sta per DayCaps e N per NightCaps, seguiti da una cifra che indica la fase del trattamento. Il tuo ortodontista ti mostrerà nel dettaglio come applicare l'allineatore.

#Suggerimenti

#COME APPLICARE L'ALLINEATORE:

Cominciando dagli incisivi, esercita una lieve e costante pressione spostandoti con la punta delle dita verso i molari, fino a che l'allineatore è perfettamente in sede.

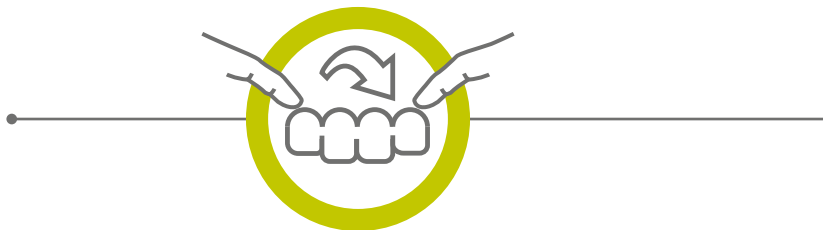

#COME RIMUOVERE L'ALLINEATORE:

Usando pollice e indice, tira delicatamente l'allineatore partendo dai molari, poi muovilo avanti e indietro con forza costante per rimuoverlo.



#Istruzioni di lavaggio

#COME PULIRE L'ALLINEATORE:

Ti raccomandiamo di pulire scrupolosamente il tuo allineatore ogni giorno: basta semplicemente spazzolarlo sia internamente che esternamente con uno spazzolino da denti a setole morbide e del sapone non profumato. Va sciacquato infine con acqua fredda. In alternativa si possono usare le compresse effervescenti Orthocaps.



ATTENTA IGIENE ORALE:

Ricorda, durante il trattamento è essenziale l'igiene orale: lava i denti scrupolosamente dopo ogni pasto, prima di rindossare gli allineatori.



#Suggerimenti

#SEGUI LE RACCOMANDAZIONI DEL TUO ORTODONTISTA:

Prima di cominciare il trattamento, il tuo ortodontista ti mostrerà come utilizzare correttamente gli allineatori. Per ottenere risultati migliori, ti consigliamo di rispettare le indicazioni d'uso. Ricorda di non mancare agli appuntamenti fissati, perché il trattamento possa venire efficacemente monitorato.





#COME CONSERVARE GLI ALLINEATORI:

Riceverai uno speciale contenitore Orthocaps dove potrai riporre gli allineatori quando non indossati. Se avessi delle domande, non esitare a contattare il tuo ortodontista.



#Domande e risposte

#Cosa faccio se gli allineatori non si incastrano correttamente? In questo caso, ti consigliamo di fissare un appuntamento con il tuo ortodontista.

#Ogni volta che cambio gli allineatori percepisco un aumento di pressione e salivazione, è normale? Sì, è assolutamente normale, dato che devi abituarti ai nuovi allineatori.

#Posso sciacquare gli allineatori con acqua calda? No, ti raccomandiamo di usare acqua fredda perché il calore potrebbe deformare gli allineatori.

#Gli allineatori impediscono di parlare

normalmente? No, puoi parlare normalmente con gli allineatori Orthocaps.

#Durante il trattamento devo evitare determinati cibi

o bevande? No, dato che gli allineatori sono rimovibili, puoi mangiare e bere tutto ciò che vuoi; tuttavia, evita bevande calde o bibite che possano macchiare gli allineatori mentre li indossi.

#Posso indossare i DayCaps durante la notte, o i

NightCaps durante il giorno? No, per ottenere risultati ottimali gli allineatori vanno portati nell'ordine prescritto nelle diverse fasi.

#Posso fumare indossando gli allineatori? La nicotina può macchiare gli allineatori, quindi ti consigliamo di evitare il fumo mentre li indossi.

#Che succede se perdo o danneggio un allineatore?

Contatta subito il tuo ortodontista Orthocaps, saprà dirti come procedere.

Per qualsiasi altra domanda o dubbio non esitare a contattarci

www.orthocaps.com

Solo per uso di prescrizione

orthocaps[®]
creating smiles

Ortho Caps GmbH

An der Bewer 8

59069 Hamm

+49 (0) 2385 92190

+49 (0) 2385 9219080

info@orthocaps.it

www.orthocaps.it



Exclusive distributor for Italy

Lancer Global Dental Partner

Via T. Edison, 14 – 20090 Trezzano sul Naviglio

Tel. 02.4453401

massimiliano.viotti@lancerglobal.com

<https://www.lancerglobal.com>